

# ВАКУУМНО-РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ

STARVAC — профессиональный физиотерапевтический вакуумно-роликовый массажер, инновационная разработка в эндермалогии инженеров и врачей французской компании MedicSystem.

Эндермотерапия – сочетанное воздействие локальной вакуум-декомпрессии и роликового массажа. Принцип работы аппарата роликового массажа заключается в создании локальной мобилизации кожи. Прибор втягивает складку между специальными подвижными роликами, которые установлены внутри головки. При этом происходит временное расширение венозных и лимфатических сосудов. В результате мышцы расслабляются, рельеф кожи выравнивается. Это позволяет бороться с дефектами фигуры без гематом и боли. Комплекс аппаратного и дренажного массажей обеспечивает превосходный результат. Кожа становится более упругой, повышается эластичность, уменьшаются растяжки, складки и морщины. Целлюлит становится менее заметен.

Аппаратный массаж позволяет эффективно бороться с местными отложениями в областях бедер, ягодиц, живота, спины. Прямое воздействие на подкожно-жировую клетчатку позволяет запустить процессы сжигания жира, нормализовать микроциркуляцию и обменные процессы.

Многолетний опыт совместной работы инженеров и врачей французской компании Starvac Group помог создать эффективную технику выполнения вакуумно-роликового массажа. Массаж сочетает и комбинирует: баночный вибрационный динамический массаж, баночный статический зональный массаж, вакуумно-роликовый массаж, вакуумный лифтинг массаж, точечный массаж (рефлексотерапия). Массаж состоит из следующих этапов: 1-помпаж; 2-лимфодренаж; 3-разогрев; 4-расслабление и формирование мышц; 5-тонизация; 6-глубокий лимфодренаж; 7-окончательная тонизация; 8-помпаж, обеспечивая безопасность, точное соответствие методикам массажа и высокое качество процедур.

## РЕЗУЛЬТАТ:

- ✓ МОДЕЛИРУЕТ КОНТУРЫ ФИГУРЫ
- ✓ КОРРЕКТИРУЕТ И ЛЕЧИТ ЦЕЛЛЮЛИТ
- ✓ ПОВЫШАЕТ ТОНУС И ТУРГОР КОЖИ
- ✓ СТИМУЛИРУЕТ ЛИМФОТОК И КРОВООБРАЩЕНИЕ
- ✓ СПОСОБСТВУЕТ ВЫВОДУ ТОКСИНОВ
- ✓ УМЕНЬШАЕТ ОБЪЕМЫ ПОДКОЖНО-ЖИРОВОЙ КЛЕЧАТКИ
- ✓ ОКАЗЫВАЕТ ДРЕНАЖНЫЙ ЭФФЕКТ
- ✓ СНИМАЕТ МЫШЕЧНЫЕ СПАЗМЫ
- ✓ РАССАСЫВАЕТ РУБЦОВЫЕ ТКАНИ, СТРИИ И ГЕМАТОМЫ
- ✓ СПОСОБСТВУЕТ СНЯТИЮ УСТАЛОСТИ И БОЛИ
- ✓ ЛИФТИНГ КОЖИ ЛИЦА
- ✓ ДАЕТ ЯРКО ВЫРАЖЕННЫЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Помимо косметических проблем, можно проводить комплексное оздоровление организма, так как аппаратный вакуумный массаж используется при лечении:

- Остеохондроза позвоночника;
- Сколиоза;
- Артритов и артрозов;
- Последствий травм (ушибов, повреждения связок и мышц, переломов и пр.);
- Устранение мышечной усталости после высоких физических нагрузок;
- Рубцов.



## Рекомендации:

Для достижения максимального эффекта желательно:

- Ограничить принятие еды за 2 часа до – и 2 часа после процедуры.
- В течение дня обильное питье чистой негазированной воды (2 л)
- Придерживаться диеты на период курса
- Сократить употребление соли, сахара, мучного, жареного
- Рекомендуется курс 10 -15 процедур, 2 - 5 процедуры в неделю, поддерживающая процедура 1 раз в 1 - 2 недели
- Сочетать вакуумный массаж с обертываниями и процедурой «Сакхун»

## Противопоказания:

- Беременность, период лактации
- Менструация
- Варикозные заболевания
- Гипертония
- Сердечнососудистые заболевания в тяжелой форме, наличие кардиостимуляторов;
- Тромбофлебит;
- Онкология, новообразования (кисты, миомы,..)
- Сахарный диабет;
- Кожно-венерологические заболевания
- Острые вирусные заболевания и др.

Эндермология безопасна при варикозном расширении вен вне стадии обострения и не является противопоказанием, но наличие этого заболевания предполагает грамотный подбор программы и более деликатную работу специалиста.

Перед тем как записаться на процедуру рекомендуем проконсультироваться со своим врачом о возможных противопоказаниях.





## АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОГРАММА

### Показания:

- Целлюлит
- Локальные жировые отложения
- Снижение тургора и тонуса кожи
- Зональное моделирование фигуры

Массаж тела

Спина

Живот

Ноги и ягодицы (зона галифе)

Проблемные зоны

Время процедуры    Стоимость услуги,  
руб.

|          |      |
|----------|------|
| 1,5 часа | 2000 |
| 40 мин.  | 950  |
| 25 мин.  | 600  |
| 40 мин.  | 950  |
| 50 мин.  | 1200 |

## ПРОГРАММА «ЛЕГКИЕ НОЖКИ»

### Показания:

- Отечность
- Усталые ноги
- Целлюлит
- Мышечные спазмы и боль в ногах
- Растяжение связок, гематомы

|         |     |
|---------|-----|
| 40 мин. | 950 |
|---------|-----|



## ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ (РАССЛАБЛЯЮЩИЙ) МАССАЖ

Показания:

- Остеохондроз
- Сколиоз
- Атония мышц
- Снижение тургора и тонуса кожи
- Отечность
- Боли в суставах и мышцах
- Невралгия

Массаж тела

Спина

Живот

Ноги и ягодицы (зона галифе)

Шейно-воротниковая зона

Проблемные зоны

Время процедуры    Стоимость услуги,  
руб.

1,5 часа

2000

40 мин.

950

25 мин.

600

40 мин.

950

25 мин.

500

50 мин.

1200

